

5分でわかる!DENNOVATE

短時間でDENNOVATE(ディノベート)が
分かる動画を配信しております。
右側のQRコードより是非一度ご視聴ください。



DENNOVATEに関する面談を ご希望の先生方、医療関係者の皆様へ

個別の面談・製品説明もWEB・お電話にて承ります。
右側のQRコードよりお気軽にご予約下さい。

面談ご予約は
こちらから



ご注文をご希望の方向け | 発注方法のご案内

販売店ページより直接ご発注いただけます。
右側のQRコードよりお申込み下さい。

ご注文はこちらから



(販売店:株式会社デンタリード)



製品情報概要

販売名:ティースホワイトニングジェルパック(過酸化水素6%)
内容量(1箱あたり):ホワイトニングジェルパック
(上顎5個・下顎5個)※再使用禁止
一般的名称:医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
高度管理医療機器/承認番号:30700BZX00175000
使用期限:2年
保管方法:室温保管

DENNOVATE

TEETH WHITENING GEL PACK



新発売

貼って、待って、はがすだけ

チェアタイム不要のホームホワイトニング

—— 新技術にて開発されたジェルシート

お電話での
お問い合わせ

株式会社デンタリード

〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15
TEL:【大阪本社】06-6396-4448 【東京支店】03-5217-0353

DENNOVATE

TEETH WHITENING GEL PACK

通勤中も、仕事でも、おうち時間も、 いつでも医療ホワイトニング

弊社では、「正しいホワイトニングをより身近にお届けすること」を使命とし、使いやすさ・効果・安全性のすべてを追求した製品開発に取り組んでまいりました。

その結果、日本人の歯列に適した独自設計のU字型ホワイトニングジェルシートを開発し、従来のホームホワイトニングにおける課題を、ひとつずつ丁寧に解決しています。




3つの特徴

point
01

個々の歯列にフィットする独自ジェルシート構造

日本人に多い歯列の形状を考慮し、シート状かつ柔軟性・弾性に優れた医療用グレード素材を使用。カスタムメイドのマウスピースを必要とせず、さまざまな歯並びに自然にフィットします。

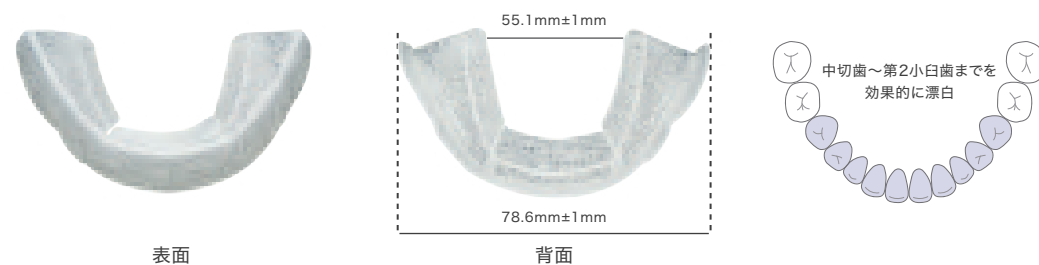

日本人における歯冠幅径の標準値*に基づき、幅径約78.6mmに設計。スマイルラインを効果的に漂白する。
* 上顎：男性76.18mm、女性72.36mm、下顎：男性65.76mm、女性62.68mm 出典：J. Jpn. Stomatol. Soc. 50(5) : 293-298, September, 2001


point
02

新技術にて開発された自己充填・液だれ不要のジェルシート

✓ 貼ってはがすだけ

✓ チェアタイムなし

独自技術を用いて、あらかじめ過酸化水素をシート内側に練りこんだデバイスとすることで、薬液の充填や取り扱いの煩わしさを軽減。液だれも防止され、安全かつ簡便にご使用いただけます。

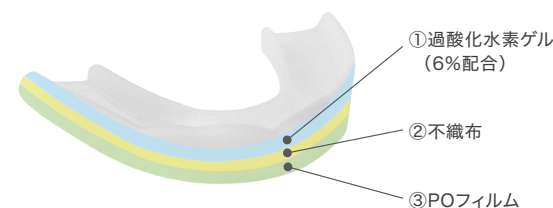

配合目的	原材料
漂白剤	過酸化水素6%
希釈・質感改善	精製水、エタノール
保湿剤	ポリビニルピロリドン、グリセリン
増粘剤・安定剤	ポリアクリル酸ナトリウム、エチルセルロース
香料	キシリトール、ステビオシド、メンソール

point
03

室温での保管が可能・単回使用のため衛生的

室温での保管が可能なため、ご自宅はもちろん、外出先でも便利にご利用いただけると同時に、本製品は使い切り（ディスポーザブル）タイプのため、毎回衛生的にご使用いただけます。

牛歯を使用したエビデンス

	0日	3日後	7日後	14日後	21日後
ティースホワイトニング ジェルパック	 シェード数値：28.33±0.58	 シェード数値：19.33±1.15	 シェード数値：15.33±0.58	 シェード数値：9.00±1.00	 シェード数値：5.67±1.53
プラセボ	 シェード数値：28.67±0.58	 シェード数値：28.67±0.58	 シェード数値：28.67±0.58	 シェード数値：28.67±0.58	 シェード数値：28.67±0.58

【対象】 染色したウシの歯 (DENNOVATE群3例、コントロール群3例)

【方法】 ティースホワイトニングジェルパックを1日1回60分、染色したウシの歯に貼付。0日、3日後、7日後、21日後時点において、シェードガイド (VITA classical) における評価、牛歯の撮影を行った。検証期間は21日とした。治療前と比較して、2シェード以上の改善があれば、製品の漂白効果ありとされる。

【結果】 貼付3日後より、シェード数値が有意に改善し、ステインなどの外来性汚れの除去が顕著であることが示唆された。また2シェード以上の改善が認められ、漂白効果が認められた。

※承認時評価資料より抜粋

使用方法



step 1

ティッシュや脱脂綿等で歯の表側・裏側の水分を拭き取ります。


POINT 特に下の歯の裏側は念入りに拭き取ることで剥がれにくくなります。
ご使用前に歯磨きを行うとより効果的です。



step 2

パッケージからジェルパックを取り出し、下の歯から貼り付けていきます。

POINT 唾液がたまらないように、顔を少し上に向けてください。まずは表側から、歯と歯ぐきの境目に合わせて端まで貼り付けてください。そのまま裏側に折り返すように貼ると、きれいに装着させることができます。

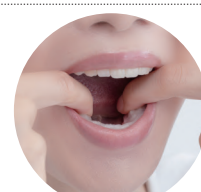

step 3

シートの端と角が浮いていないか確認し、指でなぞるように貼り付けます。

POINT 特に下の歯の裏側は指で上からしっかり押さえて密着させましょう。
歯と歯のすき間 (歯間部) は、爪でギュッとシートを押し込むようにするとフィット感がより増します。



step 4

上の歯も同様の手順で装着します。上下ともにしっかりシートが貼り付けられていることを確認して装着完了です。

POINT 唾液が出ていたら、装着前に再度拭き取りましょう。



step 5

既定の時間*装着後、取り外してください。
必要に応じて口をすいできぐ軽くブラッシングをしましょう。

装着時間目安：1日1回90分 ※歯科医師にご相談ください。

【禁忌・禁止】

①適用対象 (患者)

- ・健全でない歯 (う蝕、くさび状欠損、咬耗症、クラック等)
- ・重度の歯肉炎または歯周病を有する患者

- ・無カタルーゼ症
- ・知覚過敏症の患者

- ・妊娠中、授乳期の女性
- ・乳歯または幼若永久歯

②使用方法

- ・就寝中の着用
- ・再使用禁止

【用法・用量】

1日1回90分装着、最大使用回数は10回を限度とする。

【保管方法】

室温環境下で保管すること