

圧排作業をスムーズに 高精度な印象採得を サポート

premier
Traxodent®

トラクソデント 圧排ペースト



医療機器届出番号 27B1X0020228022

■ 洗浄が容易なため、治療時間を短縮

■ 接着性に影響がない

■ 塩化アルミニウム配合

■ シリンジ型で専用ディスペンサー不要

■ 先端のチップを交換して連続使用も可能

Traxodentの使用症例【インレー印象】

臨床写真提供：大阪府ご開業 おだデンタルクリニック 小田師巳先生



適合性に優れた補綴装置を製作するためには、印象時に鮮明なマージンを採得することが必須です。そのため一般的には、二重圧排法(絹糸による一次圧排後、止血剤を含ませた圧排糸を用いる方法)がよく用いられています。ただこの手法では、長い処置時間を要し、術者にも患者にも大きな労力がかかっていました。そこで簡単に洗い流せるこのトラクソデントを用いたところ、煩雑な圧排作業から解放され、効率的な印象採得が可能となり、非常に重宝しています。

大阪府ご開業 おだデンタルクリニック 小田師巳先生

Traxodentのみ使用したケース

■臨床写真提供
大阪府ご開業 おだデンタルクリニック 小田師巳先生



1. アプリーケーター先端を曲げて調整する。



2. 支台歯形成後の状態を確認する。



3. (アプリーケーターを支台歯の軸面と平行にし) ペーストを歯肉溝に注入していく。



4. 歯肉溝の全周にペーストをゆっくり注入する。



5. 圧排キャップ (別売:3種から選択) を使用して2分間噛んだ状態を保持する。



6. ペーストを水洗して除去する。



7. エアーで乾燥させる。



8. 印象採得

圧排系を併用してTraxodentを使用したケース

■臨床写真提供
大阪府ご開業 おだデンタルクリニック 小田師巳先生




1. 支台歯形成後、糸糸で一次圧排をした上からペーストを注入する。



2. 圧排キャップの使用で、ペーストが歯肉溝内に圧入される。



3. ペーストを水洗して除去し、エアーで乾燥させる。

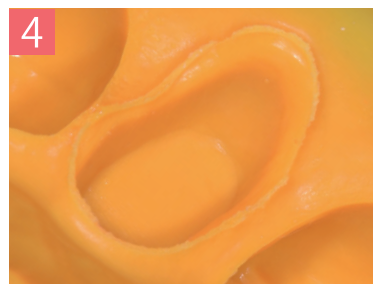

4. 印象採得

製品ラインナップ



※アプリーケーター: 6本同梱

トラクソデント トライアルパック

入数	定価(税抜)
2シリンジ	2,200円

商品コード:002-121-52



アプリーケーター 19ゲージ(ストレート)

入数	定価(税抜)
50本	5,800円

商品コード:002-121-31



※アプリーケーター:18本同梱

トラクソデント レギュラーパック

入数	定価(税抜)
6シリンジ	6,378円

商品コード:002-121-56



ベントチップ 22ゲージ(アングル40°)

入数	定価(税抜)
20本	2,400円

商品コード:003-025-51



※アプリーケーター:50本同梱

トラクソデント バリューパック

入数	定価(税抜)
25シリンジ	25,000円

商品コード:002-121-25



サイズ1
φ8mm
15個

サイズ3
φ10mm
15個

サイズ5
φ13mm
30個

圧排キャップ

入数	定価(税抜)
60個アソート	3,600円

商品コード:002-122-07

1シリンジあたりの目安 ▶ 前歯:4本 臼歯:3本

※5,000円(税抜)以上のお買い上げで送料無料です

製造販売業者

白水貿易株式会社
大阪府大阪市淀川区新高1-1-15

販売業者

DENTAL LEAD

株式会社 デンタリード

本社/大阪府大阪市淀川区新高1-1-15
東京営業所/東京都千代田区神田小川町1-11

TEL:06(6396)4448
TEL:03(5217)0353

24時間 おやくに
フリーFAX: 03(5217)0892
FAX:03(5217)0366

