

圧排作業をスムーズに 高精度な印象採得を サポート

premier®
Traxodent®



トラクソデント 圧排ペースト

医療機器届出番号 27B1X0020228022

洗淨が容易なため、治療時間を短縮

接着性に影響がない 塩化アルミニウム配合

先端のチップを交換して連続使用も可能

シリンジ型で専用ディスペンサー不要

臨床写真提供



大阪府ご開業
おだデンタルクリニック 小田師巳先生

Traxodentの使用症例【インレー印象】

臨床写真提供：大阪府ご開業 おだデンタルクリニック 小田師巳先生






1. アプリケーター先端を曲げて調整する。



2. 支台歯形成後の状態を確認する。



3. 支台歯の軸平面と平行になるようにアプリケーターを歯肉溝に挿入する。

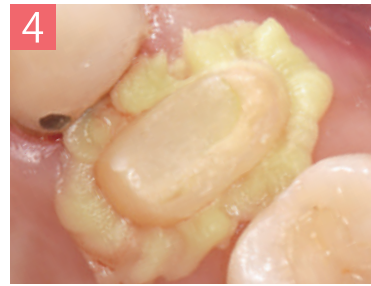

4. 歯肉溝の全周にペーストをゆっくり注入する。



5. 圧排キャップ(別売:3種から選択)を使用して2分間噛んだ状態を保持する。



6. ペーストを水洗して除去する。



7. エアーで乾燥させる。



8. 印象採得

圧排系を併用してTraxodentを使用したケース



1. 支台歯形成後、絹糸で一次圧排をした上からペーストを注入する。



2. 圧排キャップ(別売:3種から選択)を使用して2分間噛んだ状態を保持する。



3. ペーストを水洗して除去し、エアード乾燥させる。



4. 印象採得

製品ラインナップ



※アプリケーター: 6本同梱

トラクソデント トライアルパック

入数	定価(税抜)
2シリンジ	3,340円

商品コード:002-121-52



アプリケーター 19ゲージ(ストレート)

入数	定価(税抜)
50本	6,000円

商品コード:002-121-31



※アプリケーター:15本同梱

トラクソデント スターターパック

入数	定価(税抜)
7シリンジ	11,220円

商品コード:002-121-07



ベントチップ 22ゲージ(アングル40°)

入数	定価(税抜)
20本	2,400円

商品コード:003-025-51



※アプリケーター:50本同梱

トラクソデント バリューパック

入数	定価(税抜)
25シリンジ	26,840円

商品コード:002-121-25



サイズ1 φ8mm 15個
サイズ3 φ10mm 15個
サイズ5 φ13mm 30個

圧排キャップ

入数	定価(税抜)
60個アソート	3,990円

商品コード:002-122-07

1シリンジあたりの目安 ▶ 前歯:4本 白歯:3本

※5,000円(税抜)以上のお買い上げで送料無料です

圧排キャップ

小 120個 3,990円 中 120個 3,990円 大 60個 3,990円

商品コード:002-122-01 商品コード:002-122-03 商品コード:002-122-05

製造販売業者

白水貿易株式会社
大阪府大阪市淀川区新高1-1-15

販売業者



株式会社 デンタリード

本社/大阪府大阪市淀川区新高1-1-15
東京営業所/東京都千代田区神田小川町1-11

TEL:06(6396)4448
TEL:03(5217)0353

フリーFAX: 03(24)0892
24時間おやくに
FAX:03(6217)0366

