

Vertex

ベルテックス デンチャー レジン

Denture Resin

Fitness ～ 適合性 ～

重合収縮が少ない物性で優れた適合性を発揮します。

Formability ～ 成形性 ～

成形しやすく、研磨面を美しく仕上げることができます。

Durability ～ 耐久性 ～

弾性と強度を併せ持ち、割れにくく、長期間使用することができます。

Biocompatibility ～ 生体親和性 ～

残留モノマーや溶出物を抑え、生体への優しさをカタチにしました。

加熱加圧型

義歯床用アクリルレジジン

ベルテックス RS

医療機器認証番号 221AKBZX00132000

フルデンチャー&パーシャル
デンチャー用のスタンダードレジジン

- 100℃の湯で20分の急速重合に対応
(オーバーナイト重合も可能)
- 生体に優しいカドミウムフリー
- 用途に合わせて選べる全10色のシェードを用意




[技術仕様]

練和時間	30秒(液1mL:粉2.3g)
餅状時間	15分(22℃)
作業時間	30分(22℃)
重合時間	20分(100℃)
曲げ強さ	85.2MPa
曲げ弾性率	2367MPa
残留メタクリル酸メチルモノマー	2.2%以下
吸水量	22.5μg/mm ³
溶解量	0.11μg/mm ³
シャルピー衝撃強さ	9.8kJ/m ²
シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き)	1.19kJ/m ²

[種類・容量]

パウダー	1000g	500mL
	4000g	リキッド 1000mL
		5000mL

[シェード] ※シェード238…繊維なし/シェード4…クリア

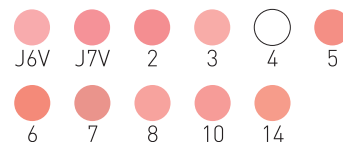

Heat &
Pressure curing



床が肉厚なケースは、係留(70℃、90分程度)することで未重合による白濁、気泡を防げます。

常温重合型


義歯床用アクリルレジジン

ベルテックス CP

医療機器認証番号 221AKBZX00130000

適合精度に優れた
流し込みタイプのレジジン

- 修理、リライニング、リベース、部分床の延長にも使用
- 独自の重合促進システムにより、色の安定性を向上

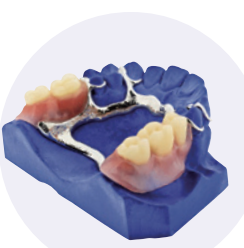

[技術仕様]

練和時間	20秒(液1mL:粉1.5g)
餅状時間	3分以内(22℃)
作業時間	6分(22℃)
重合時間	30分(55℃ 2.5気圧)
曲げ強さ	75MPa
曲げ弾性率	2293MPa
残留メタクリル酸メチルモノマー	4.5%以下
吸水量	22.1μg/mm ³
溶解量	0.7μg/mm ³ 以下

[種類・容量]

パウダー	1000g	リキッド 1000mL
------	-------	-------------

[シェード] ※シェード4…クリア



Cold curing



流し込み型レジジンの白濁、気泡、未重合の原因の1つに分離材の化学反応が挙げられます。トラブルを避けるために、Vertex社製分離材ディポセップの使用をお勧めします。室内の温度が高いと作業時間が短くなることがあります。その場合は液を冷やしてください。

交したベルテックス。

Vertex

オランダの義歯床用材料専門メーカー〈ベルテックス〉。
患者さんへ快適な義歯を届けることを第一に、国際基準をクリアした
義歯床用材料を世界各国に供給し、高い評価を得ています。

常温重合型
(即重タイプ)

義歯床補修用レジン

ベルテックス リペア

医療機器認証番号 221AKBZX00131000

短時間(10分)重合のアクリルレジン補修材

- 修理、リライニング、義歯の延長に使用
- 研磨性が良く、骨沢な表面が得られる



〔技術仕様〕

練和時間	20秒(液1mL:粉1.5g)
餅状時間	8分(22℃)
作業時間	5分(22℃)
重合時間	10分(55℃ 2.5気圧)
曲げ強さ	68MPa
曲げ弾性率	2028MPa
残留メタクリル酸メチルモノマー	4.5%以下
吸水量	20.3μg/mm ³
溶解量	1.8μg/mm ³

〔種類・容量〕

パウダー	150g	リキッド	75mL
------	------	------	------

〔シェード〕 ※シェード238…繊維なし/シェード4…クリア



Cold curing

Others

関連製品



加熱加圧重合器
マルチキュア
医療機器届出番号27B1X00020224007
■仕様
電源電圧 AC100V 50/60Hz
最高温度 100℃
最高圧力 6bar
外形寸法 330×400×350mm
重 量 23.5kg



レジン分離材
**ベルテックス
ディボセップ ブルー**
(1000mL)



シリコンパテ
ベルテックス パテ
(1000g×2) (5000g×2)



**ベルテックス
シェードガイド**
(シェード:3、4、5、6、7、8、14、J6V)

Order Guide

▶ご注文には裏表紙の〈FAXオーダーシート〉をご利用ください。

●義歯床用レジン

商品名		容量	標準価格	商品コード
義歯床用アクリルレジン ベルテックス RS	パウダー	シェードJ6V	1000g	7,820円
			4000g	21,500円
		シェードJ7V	1000g	7,820円
			4000g	21,500円
		シェード2	1000g	7,820円
		シェード3	1000g	7,820円
		シェード4	1000g	7,820円
		シェード5	1000g	7,820円
		シェード6	1000g	7,820円
		シェード7	1000g	7,820円
		シェード8	1000g	7,820円
		シェード10	1000g	7,820円
		シェード14	1000g	7,820円
	リキッド		500mL	3,650円
			1000mL	4,540円
			5000mL	16,000円
義歯床用アクリルレジン ベルテックス CP	パウダー	シェードJ6V	1000g	8,600円
		シェード4	1000g	8,600円
		シェード5	1000g	8,600円
		シェード6	1000g	8,600円
		シェード10	1000g	8,600円
	リキッド		1000mL	11,100円

商品名		容量	標準価格	商品コード
義歯床補修用レジン ベルテックス リペア	パウダー	シェード2	150g	3,150円
		シェード3	150g	3,150円
		シェード4	150g	3,150円
		シェード5	150g	3,150円
		シェード6	150g	3,150円
		シェード7	150g	3,150円
		シェード8	150g	3,150円
		シェード10	150g	3,150円
		シェード14	150g	3,150円
	リキッド		75mL	1,890円
				214-000-09

●関連製品

商品名	容量・数量	標準価格	商品コード
マルチキュア	1台	398,000円	218-000-00
ベルテックス ディボセップ ブルー	1000mL	2,640円	205-000-02
ベルテックス パテ	1000g×2	10,100円	217-000-02
	5000g×2	43,400円	217-000-07
ベルテックス シェードガイド (8種類)シェード:3、4、5、6、7、8、14、J6V	1個	6,500円	222-222-00

FAXオーダーシート

ファクシミリでのご注文も承ります。必要事項をご記入の上、送信してください。

24時間 お や く に
FAX 0120-24-0892

年 月 日

お名前	フリガナ	TEL	()
		FAX	()

※新規のお客さまのみご記入ください。

ご住所	フリガナ
	〒

●ご注文商品記入欄

商品名	商品コード	数量
	— —	
	— —	
	— —	
	— —	
	— —	
	— —	
	— —	
	— —	
	— —	

●通信欄 ご意見・ご希望がございましたらお書きください。

※掲載商品の価格は2019年11月現在のものです。消費税は含まれておりません。 ※印刷のため実物と色調は異なります。

お問合せ先

販売業者



株式会社 デンタリード

本 社／大阪市淀川区新高 1-1-15

東京営業所／東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロスタ 12F

TEL: 06(6396)4448

フリーFAX:

☎0120(24)0892

TEL: 03(5217)0353

FAX: 03(5217)0366

製造販売業者 白水貿易株式会社